

# ELECTROANALGESIA

Este aparato, al detectar la caída de resistencia cutánea mediante una alarma audible y brindar el punto de dolor para su posterior tratamiento, nos permite estar frente a uno de los hallazgos más importantes de la ELECTROMEDICINA.

¿Qué función cumple?

- I. Galvanopalpación.
- II. Bloqueo y analgesia

## **TÉCNICA DE APLICACIÓN:**

El cable de color negro debe sujetarlo o sujetarse al paciente.

El cable de color rojo permite la búsqueda y aplicación de la terapia en puntos; ya sean de acupuntura como los dolorosos.

**RECUERDE: trabajar con potencia mínima (LO) no provocar dolor.**

Se debe buscar el punto con el aparato en baja potencia (LO). En caso que suene la alarma en forma permanente en todas las zonas, puede estar sucediendo lo siguiente:

- A. Que tenga mucho nivel para esa zona (regular perilla)
- B. Que esté mojado o transpirado el paciente.
- C. Que funciones cerca un aparato de onda corta.

Un vez que se ubica el punto, efectuar con el mismo puntal entre 5 y 10 segundos de aplicación y pausas de 30 segundos.

## **PRECAUCIONES:**

- En pacientes con marcapasos en zona de implante.
- En embarazadas se contraindica.

## **INDICACIONES:**

Dolores articulares de cualquier orden: reumáticos, postraumáticos, inflamatorios, esguinces, lumbociatalgias, colores musculares, etc.

## **CARACTERÍSTICAS:**

Salidas: Rojo: piel normal  
Verde: piel sensible (niños)  
Negro: sujeto al paciente.

Interruptores: A – Encendido  
B – Selección de potencia:  
(LO) POTENCIA BAJA  
(HI) POTENCIA ALTA

ALIMENTACIÓN	TENSIÓN DE SALIDA
Batería de 9 volt.	(HI) 3 volt.
	(LO) 1,5 volt.

## **CAMBIO DE BATERIA:**

Retirando los cuatro tornillos y la tapa encontrará la batería. Desenchufe cuidadosamente y luego coloque la nueva.

**NOTA:** Cuando la alarma no suene, ni con el nivel en 10, deberá cambiar la batería. (Led con baja intensidad luminosa).

**GARANTÍA:** La misma se extiende por 6 (seis) meses, no responsabilizándonos por golpes o mal uso del aparato.

